


- Операційна система, яка використовує менше енергії і тому зберігає **ендометрій**

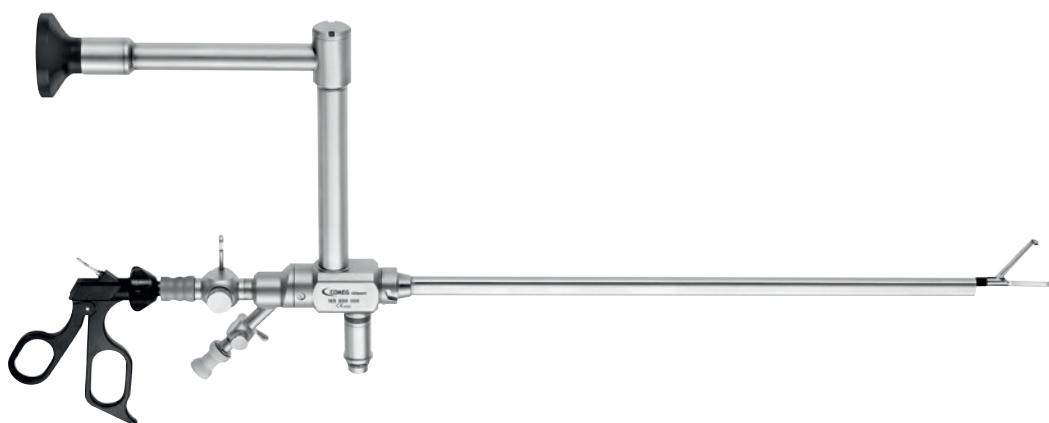

Гістероскопічна
ендо-операційна
система

HEOS
+

ІНТУЇТИВНЕ
З'ЄДНАННЯ




• МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКОГО ЧИСЛА ПАТОЛОГІЙ

Швидка і проста процедура


HEOS – це медичний пристрій, розроблений для лікування великої кількості різноманітної кількості гінекологічних патологій, завдяки використанню змінних 3 мм інструментів і при необхідності резектора:

- Поліпи
- Синехії
- Перегородки
- Міоми (класи G0, G1 або G2)
- Залишки плаценти


HEOS надає додаткові рішення для резекції. Поєднання його можливостей і лапароскопічних інструментів покращує точність процедури і зменшує використання електричної стимуляції.

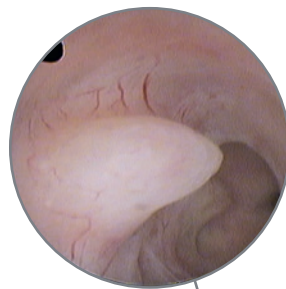


Поліп

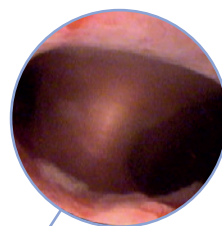


Перегородки

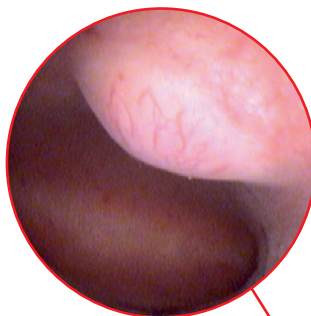

Міома

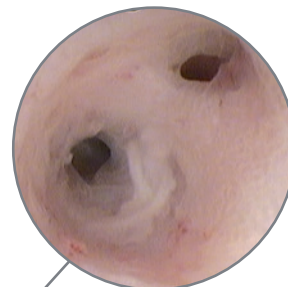

Синехії

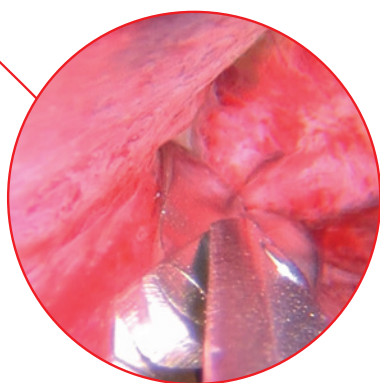

Лікування поліпу в порожнині матки з використанням вигнутих ножиць.

• ТОЧНА І БЕЗПЕЧНА ПРОЦЕДУРА, ЩО ЗБЕРІГАЄ ЕНДОМЕТРІЙ

Менше післяопераційних синехій

З HEOS можна видаляти поліпи розміром від 1 до 3 см, зменшуючи використання біполярної енергії і тим самим зменшуючи ризик виникнення рубцювання ендометрію.

Завдяки системі HEOS ендометрій і фертильність у

молодих жінок-пацієнток зберігаються при видаленні або енуклеації тканин.

Робочий канал 13 Fr означає, що ви працюєте з більшою точністю, тим самим зменшуючи кровотечу, при цьому екстракція фрагментів проходить легше.

Др. Перрін КАПМАС,
Kremlin-Bicetre
University Hospital,
Париж

« HEOS - це альтернативне лікування доброякісних новоутворень ендометрію: поліпів, 0, 1 або 2 типу міом в залежності від розміру та місця розташування, синехій та перегородок.

Використання HEOS зменшує потребу в електросекції і тим самим, ймовірно, мінімізує ризик розвитку синехій. Це суттєва перевага для молодих пацієнток, які хочуть завагітніти. »

• АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ

Час лікування коротший і не пов'язаний з розміром патології

З системою HEOS можна використовувати локальну анестезію під час операційної гістероскопії. Менше застосовується електрична стимуляція і розтягування матки з фізіологічним розчином.

Це скорочує тривалість госпіталізації, забезпечує більш повний контроль за пацієнтом в операційній і надає додатковий комфорт для пацієнта.

Гістероскопічна
ендо-операційна
система

HEOS
+

● СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ (ПРИДАТНИЙ ДЛЯ АВТОКЛАВУВАННЯ) ВКЛЮЧАЄ:

Ref. 191 306 200

HEOS універсальний прямий гістероскоп
12° з паралельним окуляром Ref. 165 800

Зовн.розміри : 8.3 мм x 6 мм, довжина 222 мм.
Автоклавуєма оптика з системою волоконно-оптичного освітлення. Робочий канал 13 Fr. Швидке блокувальне з'єднання для використання з зовнішньою лапораскопічною системою.



Система HEOS була розроблена з овальним зрошувальним каналом, спеціально адаптованим для хірургічної гістероскопії, що поліпшує зрошення.

3 мм прямі монополярні мікро ножиці
Ref. 393 310 203c

Одноходові, робоча довжина 33 см, змінна ізольована пластикова ручка без кремальєри [Ref. 393 011 100] та ізольована трубка [Ref. 393 300 203]



3 мм вигнуті монополярні ножиці
Метценбаума Ref. 393 310 251^c

Двоходові, довжина 33 см, змінна ізольована пластикова ручка без кремальєри [Ref. 393 011 100] та ізольована трубка [Ref. 393 300 251]



Зовнішній гістероскопічний тубус

Ref. 195 800 025

і стандартний obturator Ref. 195 800 070

Периферичний зрошувальний тубус. З обертовим краном і системою швидкого замку, що забезпечує швидке і спрощене використання з системою HEOS або внутрішнім тубусом резектоскопа [Ref. 195 030 530]. Стандартний obturator з підключенням Quick Lock.



3 мм щипці для захоплення та витягування,
ізольовані Ref. 393 310 201^c

2 + 3 зубці, одноходові лещата, довжина 33 см, змінна ізольована пластикова ручка без кремальєри [Ref. 393 011 100] та ізольована трубка [Ref. 393 300 265]



Біполярний L-гачок Ref. 392 993 125^c

3 мм довжина 36 см



10 з'єднань Ref. 390 070 142^a



Біполярний гачковий кабель


Будь ласка, робіть замовлення в залежності від типу використовуваного ВЧ-генератора.

Гістероскопічна
ендо-операційна
система


HEOS
+

• РОЗШИРЕНИЙ КОМПЛЕКТ для БІПОЛЯРНОЇ РЕЗЕКЦІЇ (ПРИДАТНИЙ для АВТОКЛАВУВАННЯ) ВКЛЮЧАЄ :

Стандартний комплект Ref. 191 306 200

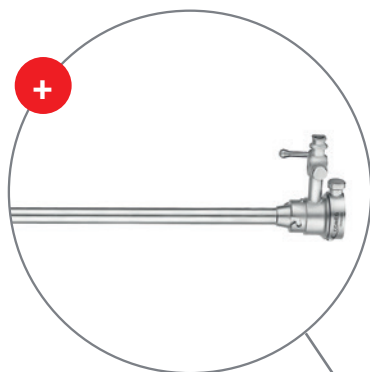


Внутрішній тубус з
одним потоком

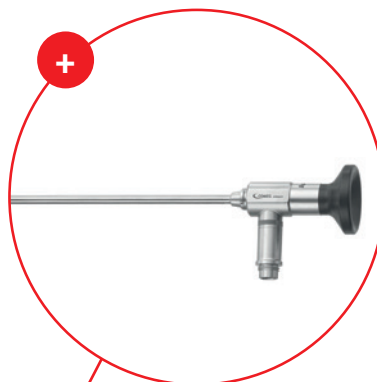

4 мм Ø ендоскоп 12°
3 мм захватні та витягуючі
щипці, 301 мм



Робочі інструменти

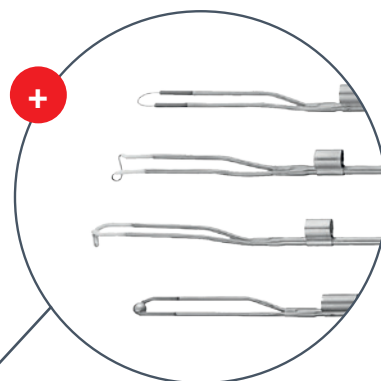

- Прямі та вигнуті
ріжучі петлі
- Коагуляційні електроди,
ріжучі та кулясті

ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО

- 3 мм інструменти з
комплекту HEOS можуть
також використовуватися в
мікро-лапароскопії.

- тубус 26 Fr з подвійним
потокм [Ref. 195 040 550].

COMEG, ВАШ ПАРТНЕР З ЕНДОСКОПІЇ


Для оптимального використання системи HEOS використовуйте наш іригатор і стерильні контейнери.

Чи відомий Вам SYMBIOZ + ?

SYMBIOZ +

FULL HD багатопрофільна медична хірургічна система

- Оптимізація зображення в реальному часі
- Персоналізоване налаштування стійки під кожного лікаря
- Поліпшення зображень з технологією ISYMORE

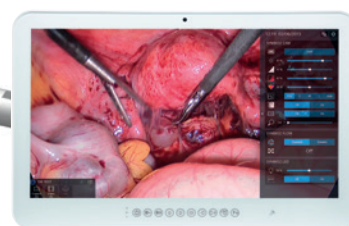

SYMBIOZ Cam+

FULL HD

Comeg Medical Technologies є медичним підрозділом Asteon Group.

- Більше 40 років досвіду в хірургічній ендоскопії
- Особлива увага приділяється міні-інвазивній хірургії (MIS)
- Глобальна присутність на 6 континентах
- Вирішення конкретних потреб в GYN, URO, ENT, LAP і ARTHRO

Comeg розробляє найкращі рішення для міні-інвазивної хірургії.

COMEG
medical technologies

ТОВ «РЕНЕСАНС МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник COMEG в Україні
Вул. Богомольця 7/14, оф.182 м.Київ, Україна 01024
Тел/факс: +380445009359 e-mail: info@comeg.com.ua

www.comeg.com.ua